



## INSTRUCTIVO PARA PREPARAR PAQUETES

<p>ELABORO:</p> <p>_____ LAURA GONZALES Dueño de Proceso- Quirurgico</p>	<p>REVISADO Y APROBADO :</p> <p>_____ GLORIA MESA Subgerente Cientifica</p>
--	---



## INSTRUCTIVO PARA PREPARAR PAQUETES

CIE-IN-002

PAGINA:

1

VERSION No: 1

### INSTRUCCIONES PARA PREPARAR UN PAQUETE

Para armar o preparar un paquete se deben seguir los siguientes pasos:

Precauciones: cerciórese que el material que va a preparar este seco y limpio

1. La bandeja o material a esterilizar se ubica en el medio de la envolvedera (que puede ser de lona o de papel).
2. Una de las esquinas se trae hacia la bandeja o material y se dobla su extremo.
3. Uno de los lados de la esquina se coloca encima del dobléz hecho en primer termino.
4. El segundo lado de la esquina se revierte también, si hay exceso de tela se dobla hacia atrás.
5. La ultima esquina se trae hacia delante por sobre la bandeja o material a esterilizar. El extremo de la ultima esquina se introduce por debajo de las primeras capas dejando solamente una pequeña punta salida.
6. Se rotula el paquete y se coloca cinta testigo. Ver instrucciones para diligenciar
7. Registre en el formato para registro de paquetes esterilizados los paquetes que se esterilizados y la entrega a los servicios.

#### **Nota Importante:**

Las envolvederas pueden ser de tela de lona o de papel (kraff), las envolvederas de lona llevan medidas de acuerdo al tamaño de los paquetes que se van a esterilizar; así tenemos de 50x50 cm, 70x70 cm, 100x100 cm y 130x130 cm.

La vida de anaquel o el tiempo en que un paquete estéril se mantiene como tal va acorde con la envolvedera a utilizar. Si la envolvedera, es de lona, su fecha de vencimiento o vida de anaquel es de quince (15) días y si la envolvedera es de papel, es de ocho (8) días.

Los paquetes con fecha de vencimiento espirada debe esterilizarse nuevamente siguiendo las instrucciones anteriores.



## INSTRUCTIVO PARA PREPARAR PAQUETES

CIE-IN-002

PAGINA:

1

VERSION No: 1

### Instrucciones para diligenciar él rotulo de paquete estéril

Para rotular los paquetes, se utiliza un stiker en el que la persona responsable de la preparación del paquete, debe registrar:

- El nombre del servicio de donde proviene ese paquete,
- El tipo de paquete: marcando con una X la casilla correspondiente al tipo de material que se va a esterilizar (ropa, instrumental, latex o vidrio). Este procedimiento garantiza la adecuada clasificación de los paquetes para programar el tiempo de esterilización.
- Fecha de esterilización del paquete
- Fecha de vencimiento
- Nombre del responsable de la preparación del paquete
- Nombre del responsable de la esterilización

### Instrucciones para diligenciar el registro de paquetes esterilizados y despacho a los servicios.

Fecha	Registre la fecha correspondiente al día que se esterilizó el paquete
Hora	Anote la hora que termino el ciclo de esterilización
Nombre del servicio	Coloque la cantidad de paquetes que se despacho a cada servicio en la casilla correspondiente: cirugía, Sala de partos, ginecoobstetricia, pediatría, UCI, Sociales, Urgencias, C. Salud
Firma	La persona responsable de retirar los paquetes del autoclave debe registrar el nombre.



# INSTRUCTIVO PARA PREPARAR PAQUETES

CIE-IN-002

PAGINA:

1

VERSION No: 1