

GUIA

USO DEL BURETROL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO

MAICAO, LA GUAJIRA



TABLA DE CONTENIDO

I. DEFINICION.....	3
II. OBJETIVO.....	3
III. PRECAUCIONES	3
IV. PROCEDIMIENTO	2

I. DEFINICION

Es un recipiente plástico graduado hasta 150cc utilizado para pasar líquidos o medicamentos, conectado por su parte inferior a un equipo de venoclísis, macrogoteo o microgoteo.

II. OBJETIVO

- Pasar medicamentos diluidos
- Pasar pequeños volúmenes de líquidos venosos. Ejemplo en lactantes, pacientes con restricción de líquidos, paso de sangre en recién nacidos, nutrición parenteral y enteral.

III. PRECAUCIONES

- Utilizar técnica aséptica
- Recuerde la importancia de un correcto lavado de las manos antes del procedimiento.
- Para pasar antibióticos u otros medicamentos, no conecte el buretrol a sueros con mezcla tales como Katrol, Aminofilina entre otros. En esos casos utilice otro buretrol.
- Cambie el buretrol y el equipo de venoclísis cada 24 horas.
- Descuento del total de líquidos ordenados al paciente, la cantidad utilizada para la dilución de los medicamentos, en pacientes con líquidos restringidos.

IV. PROCEDIMIENTO

- Cierre la llave de control de flujo tanto del equipo de venoclísis como del buretrol
- Conecte el extremo superior del buretrol a la bolsa de la solución. Una vez retirado el protector siempre debe permanecer conectado a la solución de base.
- Conecte el equipo de venoclísis a la parte inferior del buretrol.
- Abra la llave del buretrol
- Abra la llave que controla el flujo del buretrol y llene esta con la cantidad de suero necesario teniendo presente que algunos centímetros son para purgar el equipo.
- Cierre la llave que controla el flujo del buretrol.
- Llene la cámara de goteo del equipo de venoclísis hasta llevarla a la mitad
- Abra la llave de control de flujo del equipo de venoclísis y purgue este.
- Cierre la llave de control de flujo del equipo de venoclísis
- Efectúe la venopunción
- Abra la llave de control de flujo del equipo de venoclísis y purgue este
- Diluya el medicamento ordenado en una jeringa
- Desinfecte el tapón de caucho del buretrol situado en la parte superior de éste. Pase a través de éste la medicación ordenada.
- Abra la llave de control de flujo del equipo de venoclísis y pase el medicamento según el goteo
- Termine de pasar la medicación. Y llene el buretrol con 15 a 20cc de suero con el fin de enjuagar la vena.

- identifique el paciente
- Realice baño genital tanto en el hombre como en la mujer, o supervise al paciente para que se lo realice correctamente. (ver guía de baño genital).
- Pídale al paciente que orine; deseche la primera parte, recoja directamente en el frasco la cantidad deseada (segunda parte), deseche la tercera parte.
- Haga llegar oportunamente la muestra al laboratorio.
- Verifique con el medico de turno que haya realizado el cargo respectivo en el software institucional.

BIBLIOGRAFIA

MANUAL DE ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA. BRUNNER, Edición 2016,
Editorial Interamericana

ELABORACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

ELABORACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO

CONTROL	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
REALIZÓ	01-03-2017	MABIS MERCADO RUA	COORD. ASISTENCIAL
REVISÓ	01-03-2017	JESUS PEREZ	SUBGERENTE
APROBÓ	01-03-2017	ALEXANDRA LOPEZ P.	GERENTE

CONTROL DE CAMBIOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
GUIA DE USO DEL BURETROL	HSJM-GE:022	4	10/10/2022	PROCEDIMIENTO	KAREN RAMOS

REGISTRO DE COMUNICACIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA	FECHA
HENRY MARTINEZ VEGA	Subgerente		10/10/2022



